

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

TRELAX®



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологичного положения головы и шеи во время сна и отдыха.
- Постепенно развивающееся уменьшение регионарного болевого синдрома;
- Восстановление нарушенного баланса мышечного тонуса в затылочно-шейной и шейно-грудной зонах и плечевом поясе;
- Улучшение качества ночного и дневного сна и отдыха.

Показания к применению:

Комплексная программа профилактики и реабилитации:

- головной боли напряжения (ГБН);
- дискомфорта и мышечного напряжения в шее, нарушающих нормальный сон и/или дневной отдых;
- мышечных спазмов, болей в шее, в том числе с иррадиацией в затылок, грудную клетку и плечевой пояс;
- миофасциальных синдромов;
- фибромиалгий;
- хронической недостаточности мозгового кровообращения, в том числе при уже имеющей место вертебрально-базиллярной недостаточности (начало применения не ранее 3 мес. с момента острого нарушения мозгового кровообращения).

Длительное применение изделия предупреждает прогрессирование дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, суставах плечевого пояса (остеохондроз, спондило- и остеоартроз и др.) и мягких тканях, способствует нормализации кровообращения и особенно микроциркуляции во время сна и отдыха в этих зонах.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Начало применения изделия должно быть согласовано с лечащим врачом при:

- длительном или рецидивирующем, или нарастающем характере болевых и/или мышечно-тонических проявлений;
- неэффективном применении аналогичных ортопедических изделий;
- показаниях к хирургическому вмешательству;
- после оперативных вмешательств на голове и шее.

Применять с осторожностью после хирургического вмешательства на позвоночнике (в любом его отделе) и мягких тканях плечевого пояса.

Состав:

Подушка: вязкоэластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 35% лиоцелл – TENCEL® (поверхность), 65% полиэстер.

Respecta

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА

с эффектом памяти под голову, арт. П05

• ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ШЕИ

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ И ЭНЕРГИИ

• ПРОФИЛАКТИКА ГОЛОВНОЙ БОЛИ И ОСТЕОХОНДРОЗА



Комплектность: Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.

Способ применения:

Подушку располагают валиком под шею. При сне на боку и на спине – под шею располагается больший по высоте валик, меньший по высоте валик рекомендуется использовать для тех, кто засыпает на животе.

Рекомендуемое положение для сна на подушке RESPECTA

НА БОКУ



используйте валик большего размера

НА СПИНЕ



НА ЖИВОТЕ



используйте валик меньшего размера

Подбор размера:

Размер одежды	Размер подушки
42-44	S 38x60x(8)10 см
46-54	M 38x60x(10)12 см
Более 54	L 38x60x(12)14 см

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

AUTOBACK, арт. П12
CRUISE, арт. П36
OPTIMA, арт. П01
OPTIMA BABY, арт. П03
RESPECTA, арт. П05
RESPECTA BABY, арт. П35
SOLA, арт. П30
SPECTRA, арт. П04
SPECTRA SEAT, арт. П17
AUTOHEAD, арт. П16

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка при температуре не более 110°C.

Уход за заготовкой подушки: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

OPTIMA, арт. П01
RESPECTA, арт. П05

Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель. Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитывать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать. Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдения мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» – представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.